

# REFLECTYS

## Anterior and posterior universal composite

این کامپوزیت میکروهیبرید و حاوی ذرات نانو فیلر می باشد. حاوی ۸۰٪ فیلر و ۲۰٪ ماتریکس رزین Bis-GMA/TGMA می باشد.

### ویژگی ها



16 shades available

### موارد مصرف

ترمیم دندانهای خلفی که محدودیت های مهم در جویدن دارند، و دندانهای قدامی که به زیبایی زیادی در پایان کار احتیاج دارند

- تمام کلاس ها (۱ تا ۵)
- تصحیح فرم و رنگ
- دندانهای شکسته
- ترمیم دندانهای شیری



#### Technical data

Layer - Advised curing time 20s (LED).....	2,95 mm
Compressive strength.....	307 MPa
Flexural strength.....	164 MPa
Film thickness.....	8.2 µm
Absorption.....	23.1 µg/mm <sup>3</sup>
Water solubility.....	39.3 µg/mm <sup>3</sup>
Shrinkage rate.....	2.20 %
Radiopacity.....	220 %

#### Syringe or capsule

4g syringe  
0.25g capsule






۱- X-ray پوسیدگی بر روی دندان ۶ پایین سمت چپ



۲- فرم اولیه قبل از درمان پوسیدگی اکلوزالی بر روی دندان مولر اول فک پایین سمت چپ.



۳- برداشت و درمان پوسیدگی.

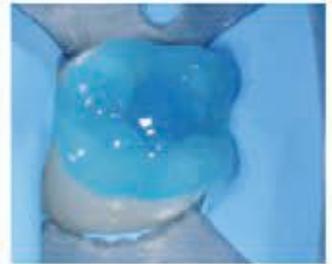

۴- اچ کردن مینای دندان به مدت ۳۰ ثانیه و بر روی دنتین با استفاده از DENTOETCH به مدت ۱۵ ثانیه.



۵- به مدت ۱۵ ثانیه شست و شو دهید و حفره را خشک کنید تا زمانی که سفید و گچی شده باشد.



۶- باندینگ Iperbond را به مدت ۲۰ ثانیه قرار دهید. سپس بر روی آن به مدت ۵ ثانیه پوار بگیرید. این کار را برای بار دوم نیز تکرار کنید و برای مدت زمان ۲۰ ثانیه + ۲۰ ثانیه لایت کیور کنید.



۷- یک لایه بسیار نازک از گلاس اینومر به روش ساندویچ استفاده کنید.




۸- قرار دادن یک لایه از reflectys -flow A3 و لایت کیور به مدت ۲۰ ثانیه.



۹- قرار دادن ۲ لایه از reflectys A2 و لایت کیور کردن هر لایه به مدت ۲۰ ثانیه.



۱۰- قراردادن لایه نازک reflectys - enamel shade و لایت کیور به مدت ۲۰ ثانیه.

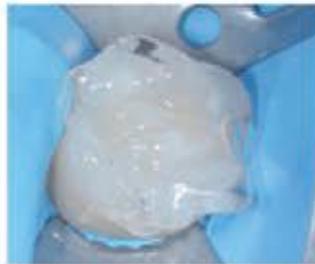

۱۱- قرار دادن گلیسرین و لایت کیور به مدت ۲۰ ثانیه.



۱۲- نتیجه بعد از درمان و خشک کردن مجدد کامل.

## References

	1 syringe (4g) + 1 spatula	20 capsules (0.25g)
A1	SRTYS-A1	CPTYS-A1
A2	SRTYS-A2	CPTYS-A2
A3	SRTYS-A3	CPTYS-A3
A3.5	SRTYS-A3.5	CPTYS-A3.5
A4	SRTYS-A4	CPTYS-A4
B1	SRTYS-B1	CPTYS-B1
B2	SRTYS-B2	CPTYS-B2
B3	SRTYS-B3	CPTYS-B3
C2	SRTYS-C2	CPTYS-C2
C3	SRTYS-C3	CPTYS-C3
D3	SRTYS-D3	CPTYS-D3

## Shade for stratification

Enamel	SRTYS-E	CPTYS-E
Incisal	SRTYS-I	CPTYS-I
Pedo	SRTYS-P	CPTYS-P
Opaque A2	SRTYS-A20	CPTYS-A20
Opaque A3	SRTYS-A30	CPTYS-A30

## Reflectys Kits

### Restoration kit

for everyday restorations

4 Reflectys syringes (A2, A3, A3.5, B2)  
+ 1 bonding Iperbond Ultra

KTYS-4.1B

### Stratification kit

for the most delicate and aesthetic cases

7 Reflectys syringes (A1, A2, A3, Opaque A2, Opaque A3, Enamel, Incisal)  
+ 1 bonding Iperbond Ultra  
+ 1 etching gel DentoEtch

KTYS-7.2BE