

PROVITEMP

Short term temporary cement TEMPORARY CEMENTATION

ویژگی ها:

- راحتی در استفاده
- (بدون اوزنول)
- فرمولی بر پایه رزین جهت سازگاری بهتر با سمان موقت
- مقاوم به دفرمه شدن (تغییر شکل) در حین جویدن
- Cementation عالی و ضد آب
- رنگ های متناسب با عاج دندان برای نتیجه ی زیبا
- بدون واکنش اگزوترمیک (گرمزا)
- حاوی فلوراید
- رادیوپاویک
- راحتی در برداشت اضافات ، بدون باقی مانده اضافی
- تمیز کردن بسیار آسان از روی پروتز موقت بعد از برداشتن آن



موارد مصرف: سمان موقت برای

- کراون و بریج
- onlay و inlay
- تست موقت روکش های دائمی

References

ProviTemp Automix syringe

5 ml syringe + 10 mixing tips PTEMP1-10

ProviTemp mixing tips

20 mixing tips for Automix syringe DTEM-20

پروتکل:



۱- ProviTemp را به درون روکش موقت تزریق کنید
(مدت زمان ۱/۵ الی ۳/۵ دقیقه)



۲- روکش را در جای خود قرار دهید و در محل نگه دارید
ست شدن اولیه ۱.۵ الی ۲ دقیقه بعد از جا گذاری آن
صورت میگیرد.



۳- اضافات آن را بردارید. ست شدن نهایی (۲/۵ الی ۳)
دقیقه