

TOTAL C-RAM

Self-etching and self-adhesive permanent resin cement Special for ceramics DEFINITIVE CEMENTATION

ویژگی‌ها

- همه با هم در یک محصول: اچینگ + پرایمر + باندینگ + سمان (All in one)
- قدرت باندینگ استثنایی
- کیور شدن دو گانه (سلف و لایت کیور)
- حالت ژل بهینه برای برداشتن راحت اضافات (۲ ثانیه کیور کنید)
- جهت سمان کردن ونیر استفاده شود به علت لایه بسیار نازک فیلم (۱۰ میکرون)
- غیر قابل حل در مایعات داخل دهانی
- سیلینگ بسیار عالی
- رادیوپاک ۲۵۰٪ AI
- قابل استفاده بر روی دندان طبیعی
- ماندگاری رنگ بالا (بدون تغییر رنگ)
- جهت نگهداری بهتر، محصول در یخچال نگه داری شود



انتخاب سه رنگ برای پاسخگویی به نیازهای همه موارد بالینی opaque dentin

شبیبه به رنگ عاج دندان با خصوصیت کدری جهت پوشاندگی بهتر
translucent
شفافیت بالا برای سمان کردن بدون هیچ سایه و رنگی بر روی درمان
ترمیمی

White

کمی کدر است و برای ونیر طراحی شده است. همچنین برای پوشاندن
نواحی طوسی و یا فلزی پیشنهاد میشود. مانند ناحیه زیر کراون

موارد مصرف:

Cementation: ونیر، پست، کراون، بریج، inlay, onlay
Self-adhesive: بر روی مینا، عاج، فلز، سرامیک، زیرکونیا، پرسلن

References

Total C-Ram translucent

8 g Automix syringe translucent + 10 mixing tips + 10 fine intra-oral tips
+ 10 extra-fine intra-oral tips..... TTCRAM-TR

Total C-Ram opaque

8 g Automix syringe translucent + 10 mixing tips + 10 fine intra-oral tips
+ 10 extra-fine intra-oral tips..... TTCRAM-OD

Total C-Ram white

8 g Automix syringe translucent + 10 mixing tips + 10 fine intra-oral tips
+ 10 extra-fine intra-oral tips..... TTCRAM-BLC

پروتکل:



۱ نمای اولیه



۲ Wax up



۳ جدا کردن (ریلیز) ونیرهای
lithium disilicate
۴ هیدروفلوریک اسید را به مدت
۲۰ ثانیه قرار داده و سپس شست
و شو دهید



۵ قرار دادن silane



۶ قرار دادن total c-ram رنگ
opaque-dentin
نواحی سرویکال و نواحی
وسطی ونیر و رنگ
translucent
بر روی نواحی انسیزال



۷ نمای نهایی