

Periodontal Gel

ویژگی ها:

ترکیبی بی نظیر از مواد طبیعی با خواص استثنایی:
به درمان التهابات کمک می کند و باعث تسریع در بهبودی لثه میشود

Film-forming texture:

ماده را به صورت متراکم و یکدست داخل حفره دهان نگه میدارد.

درد را به سرعت تسکین میدهد

هیچ گونه درد و ناراحتی در حین
و یا بعد از مصرف ایجاد نمیکند

باعث کاهش خونریزی از لثه ها میشود

تعادل PH دهان را حفظ می کند

به تسکین لثه های حساس کمک می کند



1 - Periodontal bent tip

2 - Soft application tip

Also available in pen format for home use by the patient



Technical data

Composition: Periodontal gel based principally on plant extracts with remarkable properties:

- Grapefruit seeds
- Calendula flowers
- Alchemilla leaves
- Curcumin
- Stevia extract
- Clove
- Hyaluronic acid
- Sodium carbonate

موارد استفاده:

این ژل داخل دهانی می باشد که از مواد طبیعی ساخته شده و در کشور فرانسه تولید می شود. Klirich® Pro و Klirich® می توانند بیشتر مشکلات دهان و لثه را حل کنند. این ژل برای استفاده بزرگسالان در نظر گرفته شده است. شرایط التهابی مانند التهاب لثه، خونریزی لثه، تحلیل لثه و کیست های جراحی لثه. این ژل در موارد التهاب مخاط، زخم، جراحی فلیپ (ایمپلنت) و post-scaling توصیه میشود.

CLINICAL CASES

Photos by Dr. Adrien Garnier



Papilla inflammation Day 1



Papilla inflammation Day 2



Recession Day 1



Recession Day 2



Gingival bead Day 1



Gingival bead Day 2



Inflammation before treatment




Inflammation after treatment



Periodontal surgery for root coverage

Gingival inflammation index

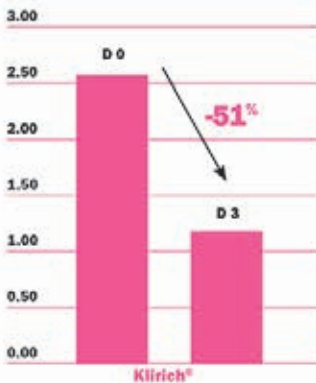

پروتکل استفاده:



۱- سرنگ را به خوبی تکان دهید تا مواد داخل آن کاملاً مخلوط شوند.

۲- یک مقدار کم از ژل را روی محل مورد نظر قرار دهید.



۳- سرنگ را بدون ماساژ دادن و یا بلعیدن به مدت ۱۵ ثانیه ماساژ دهید تا به خوبی جذب شود.



۴- آن را ساکشن کنید و سپس ۱۵ ثانیه صبر کنید سپس ژل باقی مانده را با آب شست و شو دهید.

PLAS'TIP

Ideal for cleaning periodontal pockets.
FIND IT PAGE 65



References

Klirich® Pro

2 syringes of KLIRICH Pro (3 ml) + 12 single use gingival applicator tips..... KKLIRC2S

Tips

1- 20 soft applicators tips.....KLE-GV20

2- 20 bent periodontal tips.....KLE-PR20

Klirich®

1 KLIRICH pen (4 ml).....KLIRSTYL1

3 KLIRICH pen (4 ml).....KLIR-H3S