

PURE DAY ☀

PURE NIGHT 🌙

کیت بلیچینگ برای استفاده در زمان شب و روز توسط بیمار

PURE NIGHT:
Ideal for patients with dyschromia



PURE DAY

6% hydrogen peroxide formula
2 hours per day for 7 days

PURE NIGHT

16.5% carbamide peroxide formula
7 hours per night for 7 nights



Realization of the tray Initial shade checking Final shade checking

References

Kits :

Pure Day Kit ☀

4 whitening syringes 6 % PH (2.4 g)
1 tray box
2 thermoforming laminatesPRD-H6

Pure Night Kit 🌙

4 whitening syringes 16.5 % PC (2.4 g)
1 tray box
2 thermoforming laminates.....PRN-C16

چند نکته برای بیمارانتان

چند نکته که افراد پس از درمان، دندانهای خود را همچنان سفید نگه دارند:
مسواک کردن و استفاده از نخ دندان را جدی بگیرند
بصورت مرتب توسط دندانپزشک خود چک شوید
استفاده از تنباکو، قهوه، چای که رنگ دندان را تغییر میدهد خودداری کنید
بعد از مصرف مواد رنگ دار یک لیوان آب بنوشید تا از چسبیدن و راکد ماندن مواد رنگ زا جلوگیری کنید
بین ۳ تا ۵ سال درمان سفید کردن را مجدد انجام دهید (سفیدکردن دندان خود را تجدید کنید)

HOME USE PROTOCOL



۱ سرنگ را از داخل یخچال خارج کنید و منتظر بمانید تا به دمای اتاق برسد دندان های خود را با خمیر دندان مسواک بزنید



۲ درپوش انتهایی سرنگ را بردارید



۳ یک مقدار از ژل را داخل هر جای دندان در تری بریزید ۱/۴ هر سرنگ در هر بار استفاده باید مصرف شود. درپوش سرنگ را بگذارید و آن را داخل یخچال بگذارید



۴ tray را داخل دهان بگذارید



۵ ژل را با مالیدن تری توسط انگشت بر روی دندان بخش کنید



۶ زل اضافی را با استفاده یک گوش پاک کن مرطوب از روی دندان پاک کنید



۷ فرمول هیدروژن پروکساید / ۶٪ استفاده ۲ ساعت در روز فرمول کاربامید پروکساید ۱۶/۵٪ استفاده به مدت ۷ ساعت در شب



۸ از خوردن و آشامیدن نوشیدنی های رنگ دار و یا استفاده از دخانیات در این زمان پرهیز کنید



۹ تری را بردارید



۱۰ دندان ها را به آرامی با خمیر دندان مسواک کنید



۱۱ تری را با خمیر دندان و آب بشویید



۱۲ تری را در retainer box نگه داری کنید

References

Refills

Pure Day ☀

4 whitening syringes 6 % HP (2 ml / 2.4 g) PDH6-RF

Pure Night ☾

4 whitening syringes 16.5 % PC (2 ml / 2.4 g) PNC16-RF

Pure Care

4 desensitizing syringes (2.3 g) PRC-DSB

Pure Bleaching Tray

10 thermoforming laminates, 1 mm thick PRB-10P